

KQ-P90C

保証書付

キャスター (在宅ケアベッド楽匠 S シリーズ専用)

まえがき

このたびは、キャスターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」には、キャスターを安全にお使いいただくための注意事項や使用方法などを記載しています。

●キャスターをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」および楽匠 S シリーズの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。

●ベッドで療養する方ばかりでなく、介護する方もこの「取扱説明書」および楽匠 S シリーズの「取扱説明書」をよくお読みください。

●この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。

●お買い上げの製品は改良などにより、この「取扱説明書」の内容と一部異なる場合があります。


●ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店または直接弊社までお問い合わせください。

使用目的

■この製品はベッドに取付けることにより、部屋の中での配置換えや掃除をする際などに、ベッドの移動を補助することを目的に作られています。


※長い距離や段差・傾斜のあるゆか面などでの移動には適していません。

各部の名称

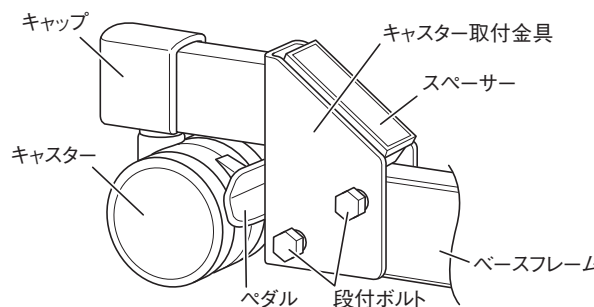


開梱と部品の確認


■開梱後、下記の部品がすべて揃っていること、破損していないことを確認してください。万一、部品の不足や破損があった場合には、販売店または直接弊社までご連絡ください。

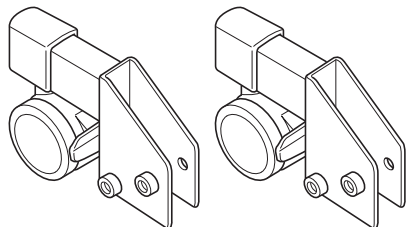


キャスター-A (2個)

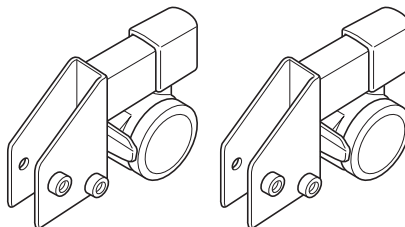


キャスター-B (2個)

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


取扱説明書 (1部)

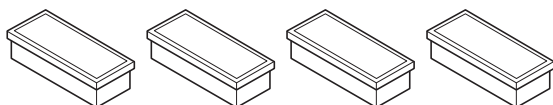

スペーサー (4個)

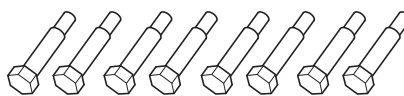


段付ボルト (8個)

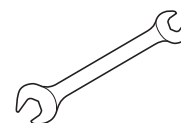


スパナ (1本)


安全に使用するための注意事項

 警告 <small>けいこく</small>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷（骨折・圧迫・麻痺 ^{まひ} など）を負う可能性が想定される内容を示しています。
--	--


- ベッドを移動させるとき以外は4ヶ所のキャスターすべてを固定状態にしてください
 - ベッドに乗り降りする際などに、ベッドが動いて思わぬけがをするおそれがあります。
- お客様による修理・改造はしないでください
 - 思わぬけがや故障の原因となります。
- 弊社が指定する適合品以外の製品とは組合せないでください
 - キャスターと組合せて使用するベッドは、必ず楽匠Sシリーズ (KQ-9***) を使用してください。指定以外の製品と組合せると、思わぬけがや故障の原因となります。

 注意 <small>ちゅうい</small>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷（打撲・すり傷・切り傷など）を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
--	--

- 長い距離や段差・傾斜のあるゆか面などでの移動は避けてください
 - 長い距離を移動させると、ベッドやキャスターの故障の原因となります。
 - ベッドの部品とゆかとのすきまが少ないため、ゆかを傷つけることがあります。また、ベッドやキャスターの故障の原因となるおそれがあります。
 - ※ ベッドの部品とゆかとのすきま：約 1cm
- スプレータイプの殺虫剤をキャスターに直接噴射しないでください
 - 殺虫剤に含まれる溶剤によってキャスターが破損・変色などするおそれがあります。また、破損した部分で思わぬけがをするおそれがあります。
- キャスターとキャスター取付金具のすき間やベースフレームとゆかとのすき間に、足先や手や指などをはさまないように注意してください
 - キャスターが旋回したときや移動させる際に、すき間にはさまれて、けがをするおそれがあります。

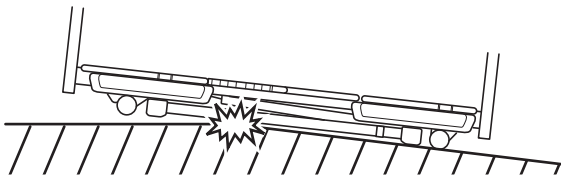


- 以下の場合にはキャスターの下に敷物（脚座カーペット：別売など）を敷いてください
 - 畳やじゅうたんなどの上で長期間使用する場合、ゆか材がへこむおそれがあります。
 - ビニル系のゆか材の上で使用する場合、ゆか材が変色するおそれがあります。

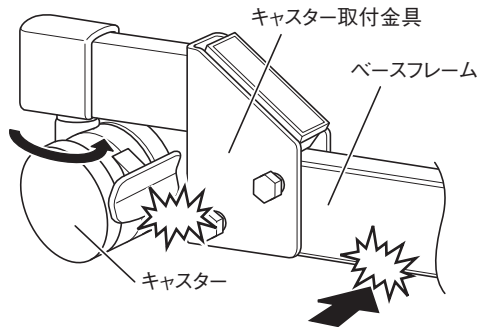

仕様

品名		キャスター	
品番		KQ-P90C	
キャスター色		ダークグレー	
主要寸法	キャスター	キャスター径：φ 65mm / キャスター幅：62mm	
	キャスター取付金具	長さ 153mm × 幅 42mm × 高さ 102mm	
製品質量（1個当り）		キャスター：約 280g / キャップ：約 40g / キャスター取付金具：約 490g	
材質	キャスター	車輪	熱可塑性エラストマー
		ペダル	ナイロン
		軸	スチール
	キャスター取付金具		スチール
	キャップ		ナイロン
	スペーサー		ポリプロピレン
段付ボルト		スチール	
適合品		楽匠 S シリーズ (KQ-9*** シリーズ)	

使用方法

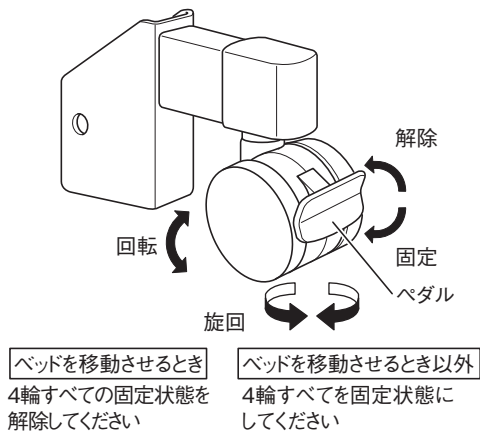

- ① ペダルを下側にするると回転・旋回ともに固定された状態になります。固定状態にするとキャスターは回転・旋回しません。
- ② ペダルを上側にするると回転・旋回ともに固定状態が解除されます。固定状態を解除するとキャスターは回転・旋回します。



- 固定状態にすると、キャスターが回転・旋回しないことを確認してください。
- 固定状態を解除すると、キャスターがスムーズに回転・旋回することを確認してください。



警告

- ベッドを移動させるとき以外は、4ヶ所のキャスターすべてを固定状態にしてください。ベッドに乗り降りする際などに、ベッドが動いて思わぬけがをすることがあります。



注意

- キャスターが固定された状態でベッドを無理に動かさないでください。ベッドやキャスターが故障したり、ゆか材を傷つけるおそれがあります。

適合品


- 楽匠 S シリーズ (KQ-9**) 専用です。
- 楽匠 S シリーズとこのキャスターの組合せは JIS 認証を取得しています。

取付方法



注意

- 組立てられているベッドにキャスターを取付けるときは、ベッドを分解してベースフレームのみの状態にし、ベースフレームの脚座を取外してから作業を行ってください。(ベッドの分解方法は、ベッド本体の「取扱説明書」中の「ベッドの分解方法」を参照してください。)

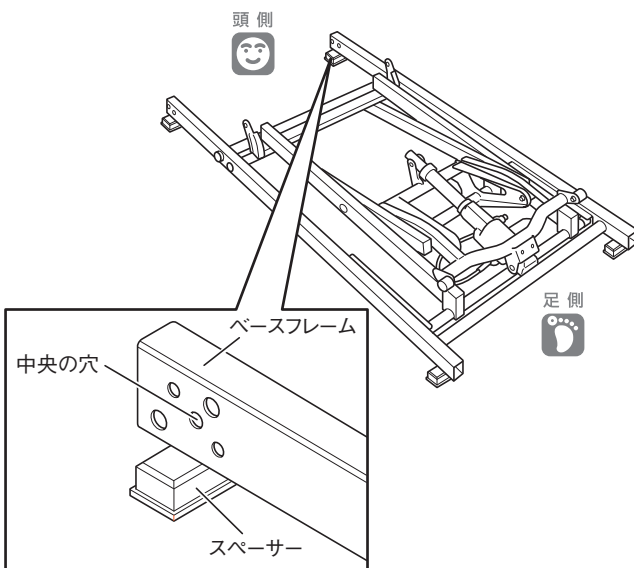

1. スペーサーの設置

- ① ベースフレームを少し持ちあげ、ベースフレームの下にスペーサーを入れてください。(4ヶ所)




- ベースフレームの中央の穴の真下にスペーサーを入れると、以降の作業がしやすくなります。



注意

- スペーサーを入れる際、手や指などをはさまないように注意してください。けがをすることがあります。

取付方法

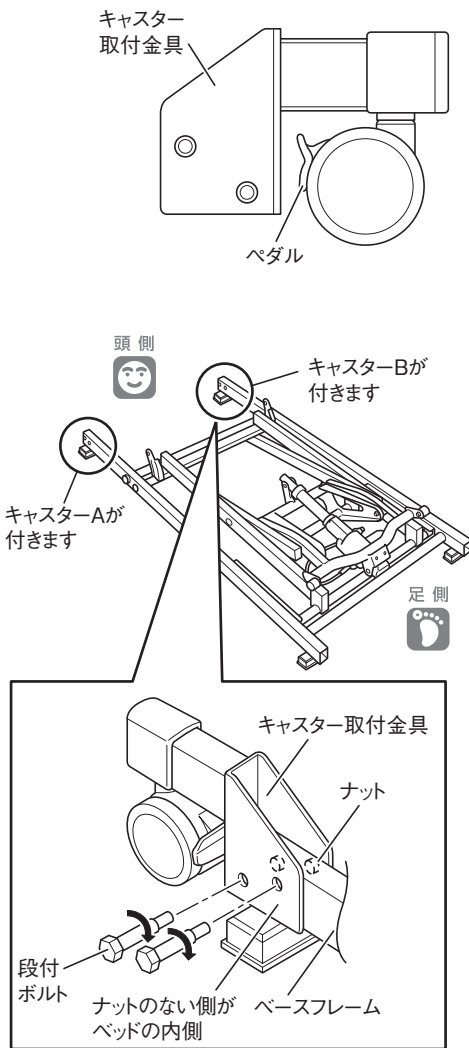

2. キャスターの固定

- 1 図のように、ペダルをキャスター取付金具に向けた状態で、4個すべてのキャスターを固定状態にしてください。

注意 ●キャスターが固定状態になっていない場合、組立作業中にベッドが動いて思わぬけがをするおそれがあります。

3. 頭側のキャスターの取付け

- 注記** ●先に頭側（2ヶ所）のキャスターを取付けてください。足側（2ヶ所）はベースフレームと足側フレームを組立てた後で取付けます。

※足側（2ヶ所）のキャスターを先に取付けてしまうと、ベースフレームと足側フレームの組立てができなくなります。

- 1 ナットがない側をベッドの内側にして、キャスター取付金具をベースフレームのパイプにかぶせてください。（頭側の左右各1ヶ所）

- 注記** ●キャスターには向きがあります。左図を参照してキャスターA・Bの取付け向きに注意してください。

- 2 段付ボルトをベッドの内側から差込んで仮止めし、付属のスパナで締付けてください。（頭側の左右各2ヶ所）

警告 ●段付ボルトは適正な状態まで締付けてください。段付ボルトがゆるんでいると、キャスターががたついたり外れてけがをするおそれがあります。段付ボルトを締付ける際、ボルトの頭とキャスター取付金具との間にすき間（右図参照）ができるのが適正な状態です。段付ボルトを締付けすぎないように注意してください。


※上から見た図
キャスター取付金具
ボルトの頭
すき間 (約3mm)

- 3 キャスター取付金具にゆるみやがたつきがないことを確認してください。


4. 足側フレームの取付け

- 1 ベッド本体の「取扱説明書」中の「ベッドの組立方法」に従って、ベースフレームと足側フレームを組立ててください。

注意 ●組立てる際に、スペーサーからベースフレームが落ちないように注意してください。思わぬけがをしたり、ゆか材を傷つけるおそれがあります。

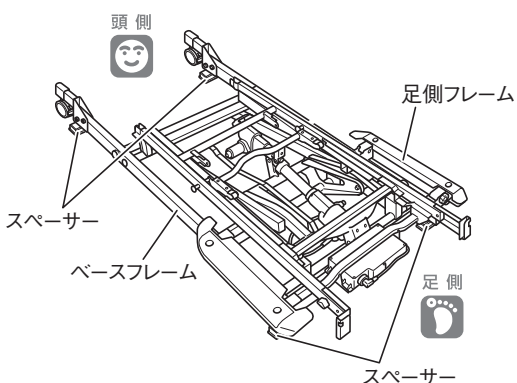

取付方法

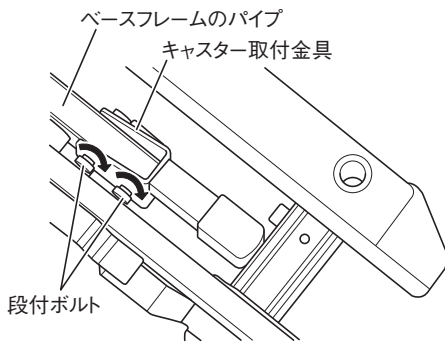

5. 足側のキャスターの取付け


- ① ナットがない側をベッドの内側にして、キャスター取付金具をベースフレームのパイプにかぶせてください。(足側の左右各1ヶ所)
- ② 段付ボルトをベッド内側から差込んで仮止めし、付属のスパナで締付けてください。(足側の左右各2ヶ所)
- ③ キャスター取付金具にゆるみやがたつきがないことを確認してください。



●足側のキャスターの取付方法は頭側と同じです。キャスターの向き・段付ボルトの締付けに関する警告・注記は「3. 頭側のキャスターの取付け」を参照してください。

6. スペーサーの取付け


- ① ベッドを少し持ち上げて、ベースフレームの下に入れたスペーサーを外し、キャスターを接地させてください。(4ヶ所)

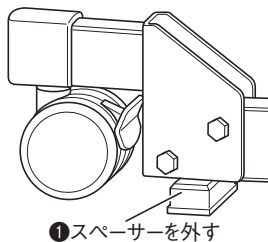

注意

●スペーサーを外す際、手や指などをはさまないように注意してください。けがをすることがあります。

- ② ①で外したスペーサーを、キャスター取付金具の開口部に取付けてください。(4ヶ所)

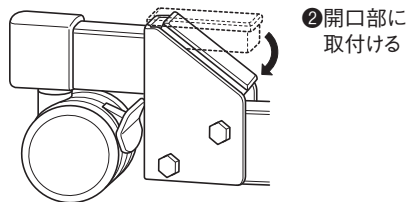

●図のように、スペーサーの端部を先に挿入すると取付けやすくなります。




注意

- キャスター取付金具の開口部にスペーサーを必ず取付けてください。開口部で思わぬけがをすることがあります。
- スペーサーを取付ける際、手や指などをはさまないように注意してください。けがをすることがあります。

※以降のベッドの組立方法については、ベッド本体の「取扱説明書」を参照してください。

取外方法

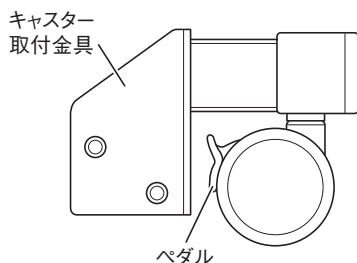

1. キャスターの固定

- ① 図のように、ペダルをキャスター取付金具に向けた状態で、4個すべてのキャスターを固定状態にしてください。



注意

●キャスターが固定状態になっていない場合、取外し作業中にベッドが動いて思わぬけがをすることがあります。

2. ベッドの分解





- ① ベッドを分解し、足側フレームとベースフレームの状態にしてください。(ベッドの分解方法は、ベッド本体の「取扱説明書」中の「ベッドの分解方法」を参照してください。)



注意

●ベッドを分解せずにキャスターを取外すと思わぬけがをしたり、ベッドが破損・変形することがあります。

取外方法

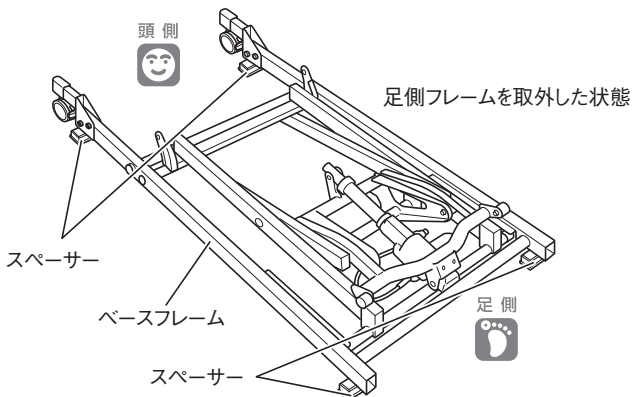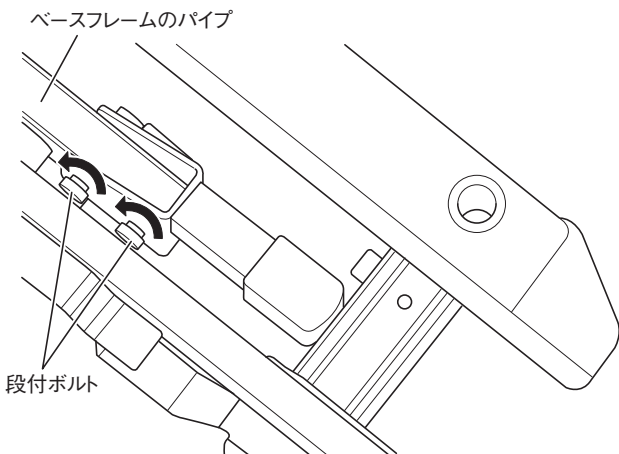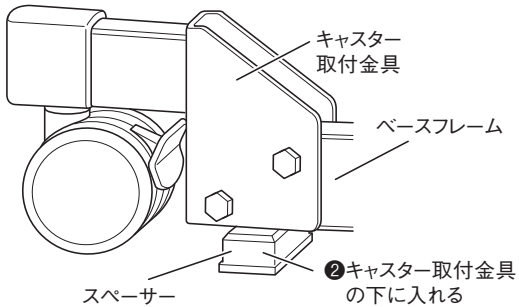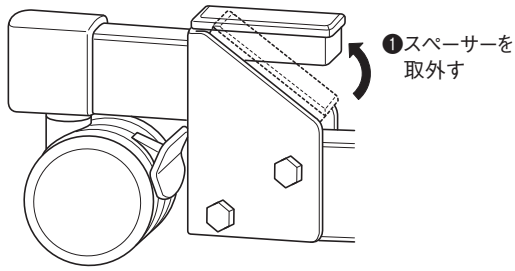

3. スペーサーの取外しと設置

- ① キャスター取付金具の開口部に取付けられているスペーサーをドライバーなどを使用して取外してください。(4ヶ所)



● 取外す際に、部品を傷つけないように注意してください

- ② ベースフレームを少し持ちあげ、ベースフレームの下にスペーサーを入れてください。(4ヶ所)



● キャスター取付金具の真下部分に入れると以降の作業がしやすくなります。

	注意	● スペーサーを入れる際、手や指などはさまないように注意してください。けがをすることがあります。
--	-----------	--

4. 足側のキャスターの取外し

- ① キャスターを固定している段付ボルトを取外してください。(足側の左右各2ヶ所)
- ② ベースフレームからキャスターを取外してください。(足側の左右各1ヶ所)





● 足側のキャスターを取外しないと、足側フレームを取外することができません。

5. 足側フレームの取外し

- ① ベッド本体の「取扱説明書」中の「ベッドの分解方法」に従って、足側フレームを取外してください。

	注意	● 取外す際に、スペーサーからベースフレームが落ちないように注意してください。思わぬけがをしたり、ゆか材を傷つけるおそれがあります。
--	-----------	--

取外方法

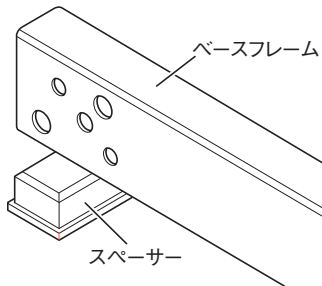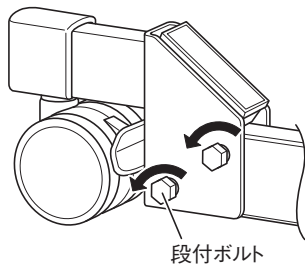

6. 頭側のキャストの取外し

- 1 キャスターを固定している段付ボルトを取外してください。(頭側の左右2ヶ所)
- 2 ベースフレームからキャスターを取外してください。(頭側の左右各1ヶ所)

7. スペーサーの取外し

- 1 ベースフレームを少し持ちあげ、ベースフレームの下からスペーサーを取外してください。(4ヶ所)



ちゅうい
注意

●スペーサーを取外す際、手や指などをはさまないように注意してください。けがをす
るおそれがあります。

お手入れ・長期保管について

■日常のお手入れ

●清拭する場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭き、その後水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた布で拭き取ってください。

※揮発性のもの(シンナー、ベンジン、ガソリンなど)やクレゾールは使用しないでください。変色・変質させるおそれがあります。

●消毒剤を使用する場合は必ず下記の薬品を指定の濃度でご使用ください。

0.05 ~ 0.2% 塩化ベンザルコニウム(オスバンなど)

0.05 ~ 0.2% 塩化ベンゼトニウム(ハイアミンなど)

0.05% グルコン酸クロルヘキシジン(ヒビテンなど)

0.02 ~ 0.05% 次亜塩素酸ナトリウム(ミルトンなど)



ちゅうい
注意

●洗剤、消毒剤で清拭した場合は、その後、水拭きをしてください。水拭きをしないと樹脂の部分が割れるおそれがあります。



●オゾン殺菌器、オートクレーブ滅菌器などには対応できません。

●キャスターへの注油や分解によるキャスター内部の清掃はしないでください。

■長期保管する場合

●高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。

温度 -10 ~ 50℃、湿度 30 ~ 90%RHの環境で保管してください。

■付属品の保管

●本取扱説明書および組立付属部品を袋などに入れて保管してください。

キャスターの交換について

■キャスターは消耗部品のため、長期間ご使用頂いた場合、摩耗、損傷などにより機能が低下するおそれがあります。下記の場合、キャスター、キャップおよびスペーサーを交換してください。

●ベースフレームを持ちあげたときにキャスターがキャップから抜ける場合。

●キャスターのペダルを下側にしても、回転・旋回が固定状態にならない場合。

●車輪の劣化により、4ヶ所のキャスターすべてを固定状態にしてもベッドが動いてしまう場合。

●スペーサーがキャスター取付金具から簡単に外れてしまう場合。

アフターサービスについて

1. 保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、記載内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼される時

修理のご依頼は、お買い上げの販売店または弊社製品の修理受付窓口であるパラテクノコールセンター（下記参照）までご連絡ください。

■連絡していただきたい内容

- 品名、品番（下記保証書を参照）
- お買い上げ日
- 破損または異常の内容（できるだけ詳しく）
- お名前、ご住所および電話番号

■保証期間内は

保証書の記載内容に基づき無償で修理いたします。ただし、保証期間内でも修理が有償になる場合があります。詳しくは下記の保証書をご覧ください。

■保証期間が過ぎているときは

修理により使用できる製品については、ご要望により有償で修理いたします。

3. 部品の最低保有年数は

弊社では、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間を製造打ち切り後8年としております。

4. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店、またはパラテクノコールセンターまでお問い合わせください。

パラテクノコールセンター ☎0120-54-8639

受付時間：平日9:00～17:20（土・日・祝日・夏季休業・年末年始休業を除く）

【パラテクノ株式会社について】

弊社製品の修理や保守点検などの各種サービスを実施する、弊社100%出資の会社です。

保証書

品名 / 品番	カスタマー / KQ-P90C	保証期間	★お買い上げ日	年	月	日より1年間
お客様	お名前	★販売店				
	〒 () ご住所		☎ ()			

★印欄の情報が確認できない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

この保証書は、本書の記載内容に基づき無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、ラベル類などの注意書きに従った正しい使用状態で故障した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

【保証規定】

- 保証期間内（お買い上げの日より1年間）に、正常なご使用状態において故障した場合は、無償で修理いたします。
- 次のような場合は、保証期間内でも修理は有償となります。
 - 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷
 - 弊社が指定する適合品以外の製品と組合せて使用したことによる故障および損傷
 - お買い上げ後の移動、設置、落下あるいは輸送による故障および損傷
 - 火災、煙害、異常電圧および地震、雷、風水害、その他、天災地変などによる故障および損傷
 - 保証書のご提示がない場合
 - 本保証書の保証期間および販売店名の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - This warranty is valid only in Japan.
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

<パラマウントベッド株式会社>

本社 〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号 東京営業部 ☎(03)3648-1171 (代)
札幌支店 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11 ☎(011)271-1181 (代)
仙台支店 〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3 ☎(022)239-5211 (代)
さいたま支店 〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号 ☎(048)852-0707 (代)
横浜支店 〒194-0004 東京都町田市鶴間1715番地1 ☎(042)795-8800 (代)

名古屋支店 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目20番17号 ☎(052)963-0600 (代)
大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号 ☎(06)6443-8791 (代)
広島支店 〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号 ☎(082)293-1311 (代)
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号 ☎(092)461-1131 (代)